


cobas[®] PCR Dual Swab Sample Kits

Pour *Chlamydia trachomatis* et *Neisseria gonorrhoeae*

Guide abrégé¹ pour le prélèvement d'échantillon du col

Ne pas tremper l'écouvillon dans le milieu cobas[®] PCR ou autre liquide avant d'exécuter le prélèvement

ÉCHANTILLON DU COL

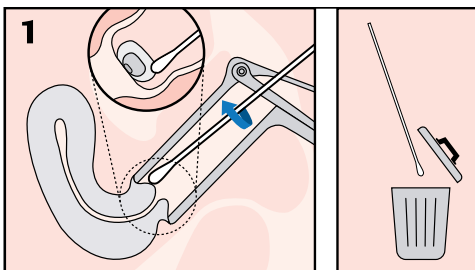


1. NETTOYER :

Utiliser l'écouvillon tissé fourni afin d'enlever tout **excès de mucus** de l'orifice cervical et de la muqueuse avoisinante.

Jeter l'écouvillon après l'utilisation.

Au besoin, utiliser un écouvillon de nettoyage à pointe large (non fourni).

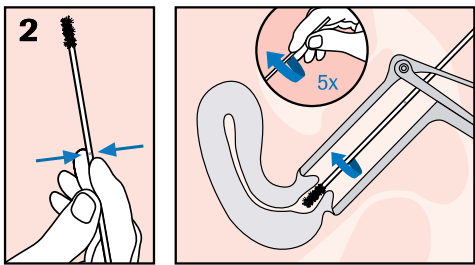


2. PRÉLEVER :

Insérer l'écouvillon floqué (brosse) (inclus dans l'emballage) au niveau du canal endocervical.

Le faire **tourner 5 fois dans la même direction**.

Retirer l'écouvillon avec précaution.

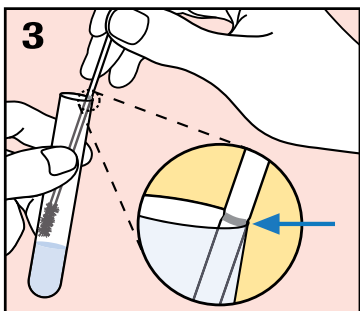


3. ALIGNER :

Retirer le bouchon du tube de milieu **cobas[®] PCR**.

Insérer l'écouvillon dans le tube jusqu'à ce que la **ligne noire** visible sur la tige soit alignée sur le rebord du tube.

L'extrémité de l'écouvillon devrait se situer juste au-dessus de la surface du liquide dans le tube.

PRÉCAUTIONS DE MANIPULATION :
Utiliser avec soin afin d'éviter les éclaboussures.

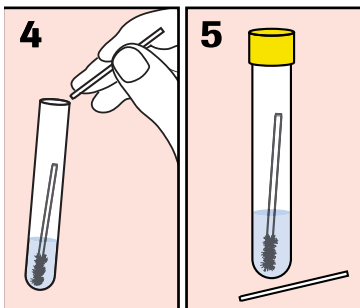

4. ROMPRE ET FERMER :

Incliner avec précaution l'écouvillon contre le rebord du tube et **rompre la tige au niveau de la ligne noire**. Jeter la partie supérieure de la tige.

Refermer le tube en serrant bien le bouchon.

L'échantillon est prêt pour le transport.

Transport : entre 2°C et 30°C • **Stabilité du prélèvement** : 12 mois

L'ÉCHANTILLON SERA REJETÉ S'IL Y A :

- Présence de deux écouvillons dans un même tube
- Absence d'écouvillon ou écouvillon tissé dans un tube
- Excès de sang (>5%)