

# **JOBST® UlcerCARE™**

Système de compression prêt-à-porter



**La méthode  
de compression  
facile à utiliser  
pour aider  
au traitement  
efficace des  
ulcères veineux**

**JOBST®**

*Confort, Santé et Style!*

# Le système de compression 2 en 1

## conçu pour maximiser l'adhérence du patient

**JOBST® UlcerCARE<sup>MC</sup>** permet la gestion efficace des ulcères veineux tout en étant facile à utiliser - la combinaison parfaite pour améliorer la qualité de vie des patients.

### Comment le système de compression 2 en 1 fonctionne-t-il?

La doublure de JOBST® UlcerCARE™ facilite l'application du bas et maintient le pansement en place. La doublure exerce une compression légère qui aide à lutter contre l'oedème durant l'alitement. Portés ensemble, la doublure et le bas procurent la compression nécessaire à la guérison d'un ulcère veineux (40 mmHg).

### Augmenter l'adhérence du patient au traitement pour un meilleur résultat :

JOBST® UlcerCARE™ est conçu pour l'autotraitement du patient. En facilitant les changements de pansements et les routines d'hygiène personnelle (p.e. la douche), il augmente l'adhérence du patient au traitement. JOBST® UlcerCARE™ favorise aussi un mode de vie normal, en permettant de porter des souliers et vêtements ordinaires.

### JOBST® UlcerCARE™ en un coup d'oeil :

- Procure une compression efficace
- Facile à utiliser pour favoriser un mode de vie normal et l'autotraitement du patient
- Combinaison parfaite pour procurer une meilleure qualité de vie au patient et maximiser son adhérence au traitement
- La doublure contient de la soie pour un confort additionnel et un enfilage plus facile du bas



JOBST® UlcerCARE™ est disponible en beige ou noir, avec fermeture éclair à gauche ou à droite pour se fermer en tout confort du côté opposé à la plaie, ou sans fermeture éclair.




**Maintenant  
disponible en  
noir**

# Une compression qui devance la concurrence

## JOBST® UlcerCARE<sup>MC</sup> s'enfile aisément.

Règle générale, plus la compression est élevée, plus le bas est difficile à enfiler et moins le traitement est observé. Pourtant, le degré de compression est un facteur déterminant de la réussite du traitement et ne peut être réduit. JOBST® UlcerCARE<sup>MC</sup> combine la facilité d'enfilage et le degré nécessaire de compression.


- **Facilité d'enfilage = patient adhérent au traitement**

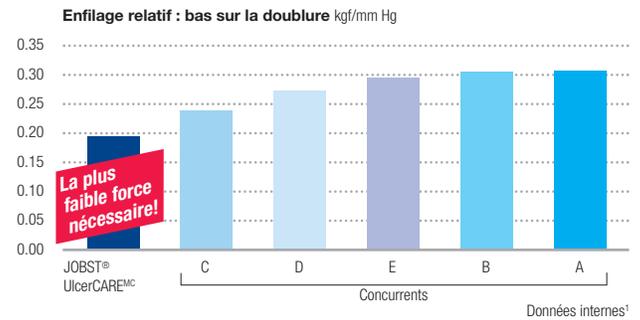

## JOBST® UlcerCARE<sup>MC</sup> prend mieux l'humidité en charge durant toute la journée.

Une absorption rapide de l'humidité procure au patient un confort accru, favorable à un port prolongé. Tant la doublure que le bas JOBST® UlcerCARE<sup>MC</sup> offrent une capacité éprouvée d'absorption très rapide de l'humidité.


- **Transport d'humidité = confort du patient**

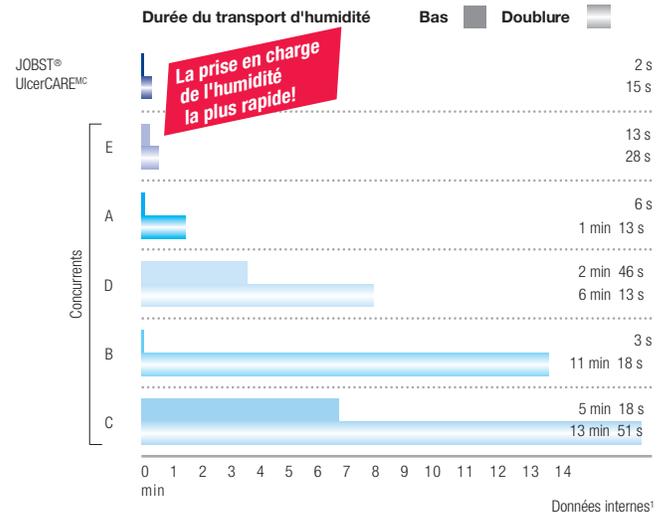

## JOBST® UlcerCARE<sup>MC</sup> procure la rigidité nécessaire.

Il est prouvé que la rigidité d'une méthode de compression est corrélée à une amélioration du temps de remplissage des veines<sup>2</sup> chez les patients souffrant d'insuffisance veineuse chronique. Seul un indice de rigidité supérieur à dix (mesuré selon la méthode statique) peut améliorer la guérison d'un ulcère.

- **Indice de rigidité > 10 = compression efficace**

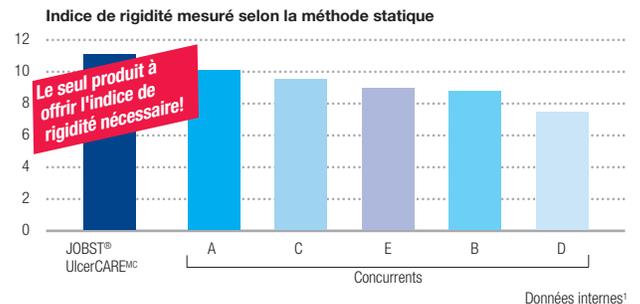

**Le nouveau JOBST® UlcerCARE<sup>MC</sup> comble toutes les exigences d'une méthode de compression efficace dans le traitement d'un ulcère veineux de la jambe, tout en améliorant la qualité de vie du patient.**

1. Les résultats des essais en laboratoire visent à illustrer le rendement d'un produit dans des conditions contrôlées. Les résultats d'une utilisation réelle peuvent varier.  
2. Énoncé de consensus de l'ICC, « Measurement of Lower Leg In Vivo », Partsch et coll., 2006.

# JOBST® UlcerCARE™

## Système de compression prêt-à-porter

JOBST® UlcerCARE™ Bas et doublures					
Taille	Couleur	Fermeture		Qté/Boîte	
		Sans fermeture éclair	Fermeture éclair à gauche		Fermeture éclair à droite
P	Beige	7363021	7363121	7363161	1 bas et 2 doublures
M	Beige	7363022	7363122	7363162	1 bas et 2 doublures
G	Beige	7363023	7363123	7363163	1 bas et 2 doublures
TG	Beige	7363024	7363124	7363164	1 bas et 2 doublures
2TG	Beige	7363025	7363125	7363165	1 bas et 2 doublures
3TG	Beige	7363026	7363126	7363166	1 bas et 2 doublures
4TG	Beige	7363027	7363127	7363167	1 bas et 2 doublures
P	Noir	7363041	7363141	7363171	1 bas et 2 doublures
M	Noir	7363042	7363142	7363172	1 bas et 2 doublures
G	Noir	7363043	7363143	7363173	1 bas et 2 doublures
TG	Noir	7363044	7363144	7363174	1 bas et 2 doublures
2TG	Noir	7363045	7363145	7363175	1 bas et 2 doublures
3TG	Noir	7363046	7363146	7363176	1 bas et 2 doublures
4TG	Noir	7363047	7363147	7363177	1 bas et 2 doublures

Nouveau  
Nouveau

Nouveau  
Nouveau  
Nouveau  
Nouveau  
Nouveau  
Nouveau  
Nouveau

JOBST® UlcerCARE™ Doublures de remplacement			
Taille	Couleur	Code	Qté/Boîte
P	Blanc	7363221	3 doublures
M	Blanc	7363222	3 doublures
G	Blanc	7363223	3 doublures
TG	Blanc	7363224	3 doublures
2TG	Blanc	7363225	3 doublures
3TG	Blanc	7363226	3 doublures
4TG	Blanc	7363227	3 doublures

Nouveau  
Nouveau

Taille		
Petit	18 – 21 cm (7" – 8 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> ")	29 – 35 cm (11 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " – 13 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> ")
Moyen	21 – 24 cm (8 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> " – 9 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> ")	34 – 41 cm (13 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> " – 16")
Grand	24 – 27 cm (9 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " – 10 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> ")	40 – 47 cm (15 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " – 18 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> ")
Très grand	27 – 30 cm (10 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " – 12")	46 – 54 cm (18" – 21 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> ")
2T grand	30 – 33 cm (12" – 13")	48 – 56 cm (19" – 22")
3T grand	33 – 36 cm (13" – 14")	50 – 58 cm (19 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " – 23")
4T grand	36 – 39 cm (14" – 15 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> ")	52 – 60 cm (20 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " – 23 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> ")



Produits sans latex

### Contenu en fibres :

Doublure : 79% nylon/polyamide ; 16% spandex/élasthane ; 5% soie. Bas : 76% nylon/polyamide ; 24% spandex/élasthane.  
Veuillez vous reporter aux directives complètes d'utilisation sécuritaire de ces produits sur l'étiquette ou le prospectus.

60705CAF R3

BSN Médical Inc. • 4455 autoroute Laval ouest, suite 255 • Laval (QC) Canada • H7P 4W6  
Tél. 1-877-978-5526 • Téléc. 1-877-978-9703 • www.jobst.com

JOBST® - une marque de 



Confort, Santé et Style!