

Cytobrush® Plus GT

Cytobrush® Plus GT ne peut être utilisé qu'une seule fois. Jeter après utilisation.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Doit être utilisé uniquement par le personnel médical.

MODE D'EMPLOI

Cytobrush® Plus GT stérile est utilisé pour faire des prélèvements endocervicaux aux fins :

1. d'études de frottis vaginaux (le prélèvement s'effectue généralement au moyen d'une spatule) ;
2. des diagnostics d'infection, par exemple : le chlamydia.

CONTRE-INDICATIONS

Ne pas utiliser Cytobrush® Plus GT sur une femme enceinte après la 10^e semaine de grossesse.

Ne pas utiliser Cytobrush® Plus GT pour les prélèvements d'endomètre.

ATTENTION

Ne jamais introduire Cytobrush® Plus GT trop profondément dans le canal cervical. Pendant toute la procédure, il faut que des poils de la brosse soient visibles dans la partie inférieure du cervix.

MISE EN GARDE

Un léger saignement peut survenir lors du prélèvement. Vérifier que ce saignement a cessé à la fin de l'examen gynécologique.

STÉRILITÉ

Ne pas dépasser la date limite d'utilisation.

Ne pas utiliser les produits dont les emballages sont ouverts ou endommagés.

Ne pas stériliser à nouveau.

INSTRUCTIONS POUR EFFECTUER LES PRÉLÈVEMENTS

1. Introduire délicatement Cytobrush® Plus GT dans le canal cervical. S'assurer que quelques poils de la brosse restent visibles à l'extérieur du col.
2. Tourner lentement la brosse d'un (1) tour.
3. Retirer Cytobrush® Plus GT.

PRÉPARATION DE L'ÉCHANTILLON POUR LA CYTOLOGIE

- Faire rouler Cytobrush® Plus GT sur une lame en verre.
- Fixer immédiatement avec un vaporisateur de cytologie ou avec de l'éthanol à 95 %.

PRÉPARATION DE L'ÉCHANTILLON POUR LA MICROBIOLOGIE, par exemple : le chlamydia

Prière de consulter un laboratoire de microbiologie pour obtenir des instructions détaillées en ce qui concerne des examens particuliers.