

# Cytobrush® Plus GT Scored

## Non stérile

Cytobrush® Plus GT Scored est à usage unique.  
Son utilisation est réservée au personnel médical qualifié.

### **INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATION**

Cytobrush® Plus GT Scored est utilisé dans la collecte d'échantillons de cellules de l'endocol de l'utérus pour la cytologie **liquide** et la microbiologie. Le dispositif a un manche pré-entaillé et il ne doit **PAS** être utilisé pour les frottis cervicaux en raison du risque de rupture involontaire du manche.

### **CONTRE-INDICATIONS**

Ne pas utiliser Cytobrush® Plus GT Scored chez la femme enceinte après la 10<sup>ème</sup> semaine de grossesse.

Ne pas utiliser Cytobrush® Plus GT Scored pour les prélèvements de l'endomètre.

### **ATTENTION**

Ne pas introduire Cytobrush® Plus GT Scored trop profondément dans l'endocol. Pendant toute la procédure, il faut que des poils de la brosse soient visibles dans la partie inférieure du col.

### **MISE EN GARDE**

Un léger saignement peut survenir lors du prélèvement. Vérifier que ce saignement a cessé à la fin de l'examen gynécologique.

### **MODE D'EMPLOI**

1. Introduire délicatement Cytobrush® Plus GT Scored dans l'endocol. S'assurer que quelques fibres de la brosse restent visibles à l'extérieur du col.
2. Tourner lentement la brosse d'un tour (1).
3. Retirer Cytobrush® Plus GT Scored.

### **PRÉPARATION DE L'ÉCHANTILLON**

Consulter le laboratoire pour obtenir des instructions détaillées relatives à chaque test spécifique.