


Aiguilles de remplissage émoussées BD^{MC} et aiguilles filtres émoussées BD^{MC}

Importantes directives d'emploi



1. Fixation de l'aiguille


Fixez l'aiguille de remplissage émoussée ou l'aiguille filtre émoussée BD à n'importe quelle seringue hypodermique standard à bout Luer-Lok^{MC} ou luer-slip et tournez jusqu'à ce qu'elle soit bien solidaire de celle-ci. Enlevez le capuchon en le tirant en ligne droite.

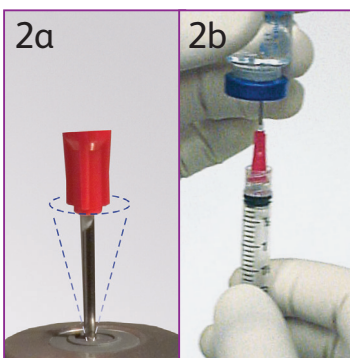

2. Aspiration

2a Insérez l'aiguille de remplissage émoussée dans le flacon de médicament à un angle de 90 degrés afin d'éviter de pénétrer la paroi interne du bouchon. Remarque : Utilisez une aiguille filtre émoussée BD pour les ampoules de verre.

2b Aspirez le médicament en suivant le protocole de votre établissement.

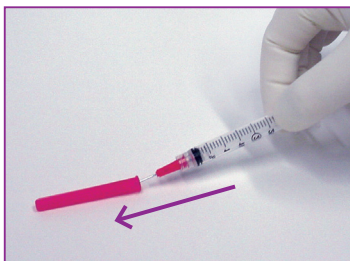

3. Recapuchonnage

Recouvrez à une méthode « passive » pour remettre le capuchon sur l'aiguille de remplissage émoussée ou l'aiguille filtre émoussée BD.



4. Mise au rebut

Après l'utilisation, retirez l'aiguille de la seringue et jetez-la aussitôt dans un contenant pour objets piquants et tranchants approuvé à cette fin.

N'oubliez pas :

- Les aiguilles de remplissage émoussées et les aiguilles filtres émoussées BD ne doivent pas être utilisées pour les injections cutanées.
- Suivez le protocole de votre établissement en ce qui concerne la technique d'asepsie.
- De même, suivez le protocole de votre établissement en ce qui concerne la mise au rebut sécuritaire de tous les déchets médicaux.
- L'aiguille filtre émoussée BD doit être utilisée uniquement avec des ampoules de verre.
- L'aiguille filtre émoussée BD comporte un filtre à sens unique et doit être retirée aussitôt que le liquide a été transféré dans la seringue.
- Pour fixer une aiguille de remplissage émoussée ou une aiguille filtre émoussée BD à une seringue luer-slip, enfoncez-la fermement.

Aiguille de remplissage émoussée BD^{MC}



Aiguille filtre émoussée BD^{MC}



La couleur de l'embase diffère entre les deux aiguilles.