



# INSYTE<sup>mc</sup> AUTOGUARD<sup>mc</sup> de BD

## Cathéter intraveineux à fourreau protecteur

Avant l'activation

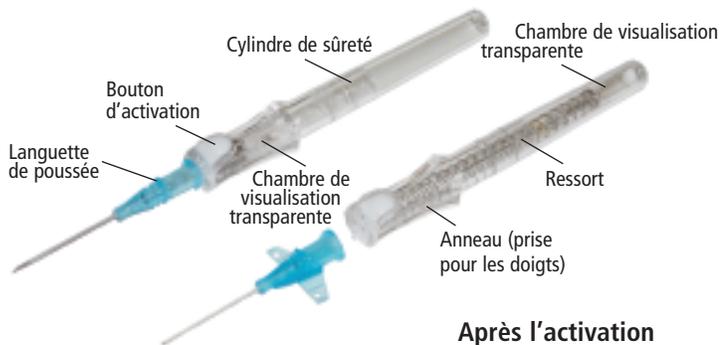

2

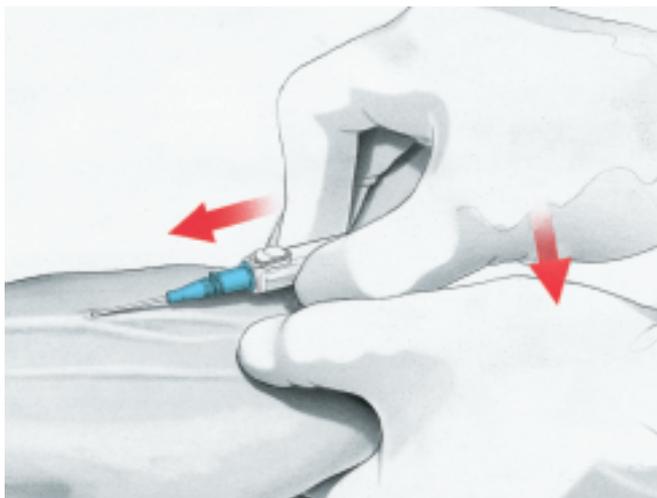

## MODE D'EMPLOI

### 1 PRÉPARATION

- S'assurer d'avoir à portée de la main tout le matériel dont on aura besoin durant la perfusion.
- Désinfecter le point de ponction en suivant les méthodes et directives en vigueur.
- Avant de pratiquer la ponction veineuse, faire faire une rotation de 360 degrés au cylindre.

### 2 PONCTION VEINEUSE

- Approcher de la veine doucement, à un angle réduit.
- Surveiller l'afflux de sang dans la chambre de visualisation transparente. Si l'on utilise une aiguille de calibre 22 ou 24, l'afflux de sang sera visible le long du cathéter.

### 3 PROGRESSION

- Dès que l'on aperçoit un afflux de sang dans la chambre de visualisation transparente, réduire l'angle de rentrée jusqu'à ce que l'aiguille soit presque parallèle à la peau.
- Pousser délicatement l'ensemble aiguille-cathéter avant de faire progresser le cathéter.
- Étirer la peau pour faire progresser le cathéter dans la veine.

### 4 RETRAIT DE L'AIGUILLE

#### Avant d'appuyer sur le bouton d'activation

- Enlever le garrot.
- Avec le doigt, presser un point de la veine passé le bout du cathéter.
- Immobiliser l'embout du cathéter.
- Appuyer sur le bouton blanc.


### 5 IMMOBILISATION DU CATHÉTER

- Immobiliser le cathéter en appliquant un pansement stérile conformément aux méthodes et directives en vigueur.


### CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- **Ne pas** retirer l'aiguille de l'embout du cathéter avant d'avoir appuyé sur le bouton blanc.
- **L'aiguille doit être rétractée avant d'être jetée** dans un collecteur d'objets pointus étanche et résistant à la perforation.
- **Ne jamais introduire de nouveau l'aiguille** dans le cathéter car il pourrait se déchirer.
- **Ne pas utiliser de ciseaux** au point de ponction ou aux alentours.

3

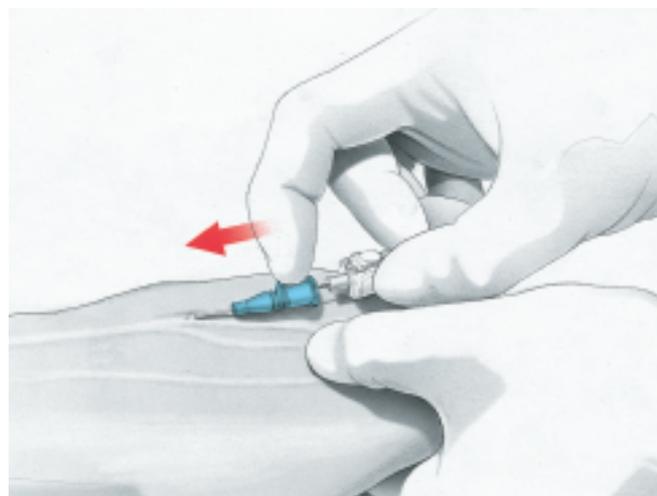

4

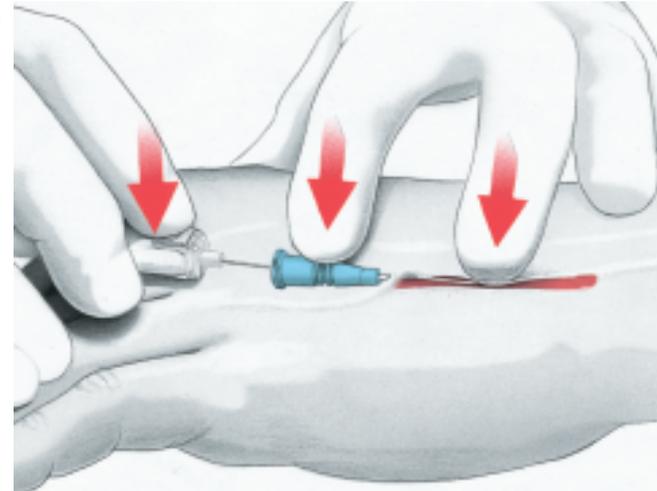

# INSYTE<sup>mc</sup> AUTOGUARD<sup>mc</sup> de BD

## Cathéter intraveineux à fourreau protecteur

### CONSEILS À RETENIR

#### COMMENT RENTRER DANS LA VEINE

- Rentrer délicatement l'aiguille dans la peau.
- Ne pas exercer trop de pression pour pénétrer la peau.
- Maintenir un angle peu prononcé au point de ponction et garder le coude bas.
- Dès qu'on aperçoit un afflux de sang, réduire l'angle de ponction et faire avancer l'aiguille de 0,8 mm (1/8 pouce).
- Avant de rentrer l'aiguille, vérifier si l'embout est ouvert en faisant faire une rotation de 360 degrés au cylindre.

#### SIGNE « POP »

- Le « POP » risque d'endommager la veine.
- L'afflux de sang est un meilleur indicateur que le biseau de l'aiguille est bien dans la veine.
- Rentrer doucement l'aiguille pour apercevoir un afflux de sang.
- Sentir la perte de résistance lorsqu'on pénètre la veine.

#### COMMENT SURVEILLER L'AFFLUX DE SANG

- Se fier à son intuition et faire une pause.
- Surveiller l'afflux de sang derrière le ressort.
- Si l'on utilise une aiguille de calibre 22 ou 24, s'assurer que l'afflux de sang apparaît d'abord le long du cathéter.
- Tenir compte de certains facteurs comme des veines de petits calibres, un patient de petite taille, la tension artérielle, l'état des veines, la déshydratation, etc.

#### COMMENT FAIRE PROGRESSER L'AIGUILLE DANS LA VEINE

- Dès qu'on aperçoit un afflux de sang, réduire l'angle de ponction et faire avancer l'aiguille de 0,8 mm (1/8 pouce).
- Éviter de faire progresser l'aiguille en la poussant et en la tirant.
- Avant de rentrer le cathéter, vérifier si l'embout est ouvert en faisant faire une rotation de 360 degrés au cylindre.
- Étirer la peau.

#### COMMENT RETIRER L'AIGUILLE

- Avant de rentrer le cathéter, vérifier si l'embout est ouvert en faisant faire une rotation de 360 degrés au cylindre.
- Exercer une pression sur la peau **passé** l'embout du cathéter.
- S'assurer qu'on n'a pas courbé l'aiguille par mégarde en appuyant sur le bouton d'activation.

#### COMMENT RÉDUIRE AU MINIMUM LE SAIGNEMENT

- Desserrer le garrot avant d'appuyer sur le bouton.
- Exercer une pression sur la peau **passé** l'embout du cathéter.
- Avoir à portée de la main un adaptateur ou une tubulure à perfusion.

#### ACTIVATION

- Faire attention à l'emplacement des doigts.
- Retirer le capuchon de l'aiguille en le tirant vers l'extérieur.



BD Medical Systems

2771 Bristol Circle, Oakville, ON L6H 6R5

www.bd.com

BD, Autoguard et Insyte sont des marques déposées de Becton, Dickinson and Company. ©2001-BD

BDM-70.