

Hypafix[®] transparent

Innovation en matière de fixation



FILM TRANSPARENT


NOUVEAU!

- Imperméable
- Barrière antibactérienne
- Perméable à la vapeur d'eau
- Adhésif d'acrylique

Hypafix[®] transparent

FACILE D'APPLICATION

GRÂCE À UNE TECHNOLOGIE SIMPLE ET EFFICACE DU PAPIER PROTECTEUR

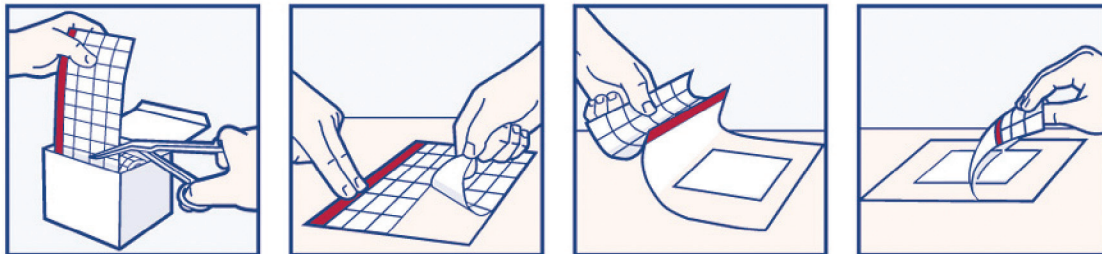

TECHNIQUE D'APPLICATION BREVETÉE

1. Coupez la grandeur désirée en vous servant des lignes imprimées comme guide.
2. Le papier protecteur est en 2 parties.
Premièrement retirez la partie opposée à la ligne rouge.
3. Deuxièmement, appliquez sur le pansement et assurez-vous de bien coller la pellicule sur la peau environnante.
4. Troisièmement, retirez la deuxième partie du papier protecteur qui finira de couvrir le pansement et assurez-vous de bien coller la pellicule sur la peau environnante. Pour terminer la fixation, appliquez une légère pression sur la bande rouge.
5. En dernier lieu, repliez le papier protecteur sur lui-même, en revenant sur vos pas. Cette pellicule (avec la bande rouge) se détachera facilement et laissera la pellicule transparente sur la peau.

Grandeurs disponibles

7237800	5 cm x 10 m	1 rl par bte - 12 btes
7237801	10 cm x 10 m	1 rl par bte - 12 btes
7237802	15 cm x 10 m	1 rl par bte - 12 btes



BSN medical

Adressez-vous à notre service à la clientèle
au **1 877 978 5526** ou allez au site Web **www.bsnmedical.ca**

® Marque de commerce de BSN medical

BSN medical Inc.
4455, autoroute Laval Ouest, suite 255
Laval, (QC) Canada H7P 4W6