

CompriFoam®

Bandage de caoutchouc mousse à alvéoles ouverts



Répartition
uniforme de
la pression
pour une thérapie
de compression
efficace

Comprifoam®

Bandage de caoutchouc mousse à alvéoles ouverts

Aperçu

Le bandage de caoutchouc mousse à alvéoles ouverts Comprifoam® est idéal comme coussin sous les bandages de compression pour les indications phlébologiques et lymphologiques. Il est conçu afin de distribuer uniformément la pression des bandages de compression sur les extrémités, prévenant donc la constriction et assurant une thérapie de compression efficace. De plus, la texture non glissante de la mousse rend l'application du bandage de compression (p. ex. Comprilan®) plus facile. Comprifoam® est aussi utile comme matériel de rembourrage sous les moulages en plâtre et synthétiques dans les applications orthopédiques.

Mode d'emploi

- Appliquer durant la phase de traitement du lymphoedème par drainage lymphatique pour amener une réduction de l'œdème et une augmentation de la pression sur les tissus afin de prévenir une nouvelle accumulation des fluides évacués par l'œdème.
- Appliquer sous les bandages de compression (p. ex. Comprilan®) pour uniformiser la circonférence des membres et ainsi obtenir une distribution de la pression adéquate.
- Appliquer par-dessus un bandage tubulaire et sous un bandage de compression (p. ex. Comprilan®) ou sous les moulages en plâtre ou synthétiques pour un aspect coussiné.

Avantages du produit

- 100% polyuréthane, sans latex.
- Perméable à l'air et à l'humidité.
- Non glissant — le verrouillage des pores ouverts veille à ce que le bandage reste en place et ne glisse pas.
- Résistant à la déchirure.
- Les patients peuvent, avec facilité, faire eux-mêmes leurs bandages puisque ce produit ne se plisse pas.
- La conformité anatomique permet une liberté de mouvement.
- Résistant aux huiles corporelles, aux lotions et à la sueur.
- Réutilisable.
- Peut être stérilisé à la vapeur.

Mises en garde


- Couvrir toute plaie ouverte d'un pansement approprié.
- Le jaunissement, s'il survient, ne devrait pas nuire à la performance.

Information de commande

N° de réf.	Description	Couleur	Contenu d'une boîte
7529400	10 cm x 2,5 m x 0,4 cm	Blanc	1 rouleau/boîte
7529500	12 cm x 2,5 m x 0,4 cm	Blanc	1 rouleau/boîte

Se référer à l'étiquette des produits ou à la notice qui accompagne ceux-ci pour des instructions complètes sur l'utilisation sécuritaire de ces produits.


Méthode d'application

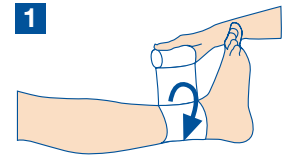


Commencer le bandage à la cheville et continuer de manière latérale.




Couvrir le dos et le milieu du pied d'une épaisseur. Amener le bandage jusqu'à la base des orteils.

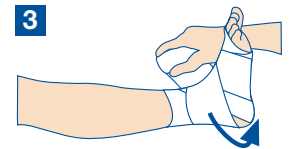


Continuer le bandage transversalement vers le talon.

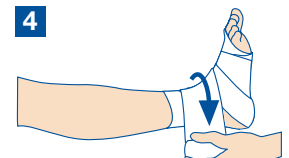

Continuer le bandage en spirale vers le muscle du mollet...

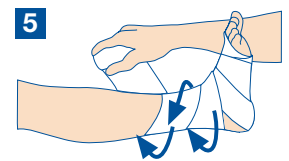

...en faisant un chevauchement à 50% de la largeur du bandage à chaque tour.

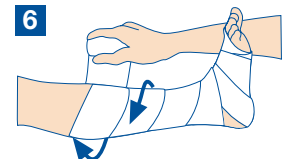

Terminer le bandage à une largeur d'environ deux doigts sous la tubérosité tibiale.