



Commencer par nettoyer la peau péristomiale (peau autour de la stomie) à l'aide d'un savon doux, puis rincer à l'eau. Les savons devraient être exempts d'huiles et de crèmes. Attention : Toute substance huileuse restant sur la peau peut empêcher une bonne adhérence de la barrière cutanée. Assécher complètement par tapotements.

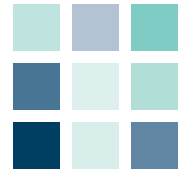

1

## PRÉPARATION ET APPLICATION DU PROTECTEUR CUTANÉ

1. Réchauffer le protecteur cutané dans ses mains pendant environ 30 secondes.
- 2a. **Étirer le protecteur pour l'ajuster autour de la stomie**  
Pour certaines personnes, il est plus facile d'appliquer le protecteur cutané Eakin Cohesive® directement sur la peau. Pour appliquer le protecteur cutané autour de la stomie, retirer le papier protecteur des deux côtés, puis le mouler, le rouler, l'étirer ou le comprimer pour lui donner la forme souhaitée. Le protecteur cutané peut être découpé et rejoint pour s'ajuster aux stomies difficiles à prendre en charge.

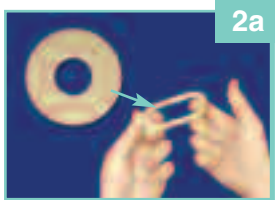

2a


- 2b. Appliquer le protecteur cutané sur votre corps en s'assurant de ne laisser aucune surface de peau exposée autour de la stomie. Aplatir les bords du protecteur cutané et le maintenir en place pendant environ 30 secondes afin d'assurer une bonne adhérence\*.



2b

### OU Appliquer directement le protecteur sur l'appareillage pour stomie

Certaines personnes préfèrent appliquer le protecteur cutané directement sur la barrière cutanée ou l'appareillage pour stomie. Dans ce cas, retirer le papier protecteur puis modeler le protecteur cutané à la forme souhaitée directement sur la barrière cutanée ou l'appareillage pour stomie.

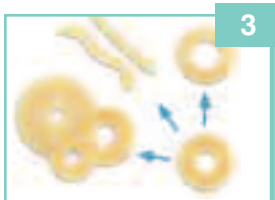

3

## AUTRE USAGE DU PROTECTEUR CUTANÉ EAKIN COHESIVE® Nivelier la surface irrégulière de la peau

3. Il est parfois nécessaire de niveler une surface de la peau péristomiale irrégulière pour aider à prévenir les fuites. Dans ce cas, retirer le papier protecteur des deux côtés de l'anneau, sectionner le protecteur cutané en plus petits morceaux, puis rouler ou modeler ceux-ci. On peut ainsi briser le protecteur, puis ensuite en joindre les morceaux au besoin. Une fois que le protecteur cutané Eakin Cohesive® a la forme souhaitée, l'appliquer en exerçant une pression sur la peau. Lorsque le protecteur cutané est en contact avec la peau, il est possible d'aplatir délicatement les bords ou le modeler afin d'obtenir un ajustement sur mesure.



4

## MISE EN PLACE DE L'APPAREILLAGE POUR STOMIE

4. **Appareillage à deux pièces :** Si on a déjà appliqué le protecteur cutané autour de la stomie, coller la barrière cutanée sur la peau et le protecteur cutané, puis mettre en place le sac sur la barrière cutanée. Si on a appliqué le protecteur cutané directement sur la barrière cutanée, coller celle-ci sur la peau, puis mettre en place le sac sur la barrière cutanée.

**Appareillage à une pièce :** Si on a déjà appliqué le protecteur cutané autour de la stomie, appliquer l'appareillage pour stomie par-dessus le protecteur cutané. Si on a appliqué le protecteur cutané sur l'appareillage, placer l'appareillage sur la peau.

Maintenir le sac ou la barrière cutanée en place quelques instants pour assurer une bonne adhérence\*



Pour de plus amples renseignements sur ce produit ou d'autres produits de ConvaTec, communiquez avec notre Centre des relations avec la clientèle (infirmières autorisées sur appel), du lundi au vendredi, de 8 h à 18 h (HNE) au 1 800 465-6302 ou visitez notre site Web au [www.convatec.ca](http://www.convatec.ca)

\*Consulter la notice pour le mode d'emploi détaillé.

Eakin Cohesive est une marque déposée de T.G. Eakin Limited

Fabriqué par : T.G. Eakin Limited - Irlande du Nord

© 2011 ConvaTec Inc.

AP-002348-CA

VCODE: 790