

Aide à la marche

Béquilles en aluminium

- Fabriquées en aluminium léger ionisé résistant à la corrosion
- Appuis-mains ajustables en hauteur
- Bouton-poussoir permettant un ajustement rapide et sécuritaire en hauteur par intervalles de 2.5 cm (1")
- Identification de la hauteur requise sur le tube central
- Les béquilles sont équipées des accessoires suivants :
 - 934 - Embouts
 - 936 - Coussins
 - 938 - Appuis-mains

Modèles disponibles

CODE	GRANDEUR DE L'USAGER	TAILLE
4031	1.38 – 1.58 m (4'6" – 5'2")	PETIT
4032	1.58 – 1.79 m (5'2" – 5'10")	MOYEN
4033	1.79 – 1.99 m (5'10" – 6'6")	GRAND

Comment ajuster des béquilles

1. Garder le corps bien droit, épaules relâchées.
2. Le haut de la béquille doit être à 2" (5cm) sous l'aisselle.
3. Les appuis-main sont vis-à-vis les poignets.
4. Le sabot de la béquille doit être à 6" (15cm) du pied.

