



Pansements non adhérents







Retrait sans douleur.

Pansements Telfa non adhérents

- Comprennent un film de polyester perforé à centre absorbant en coton dense non tissé pouvant être utilisé avec différents types de plaie
- Surface non adhésive avec perforations à bordure lisse qui permet de retirer le pansement sans douleur tout en le gardant intact
- Permettent à l'exsudat de s'écouler par les perforations de dimension optimale sans adhésion des tissus
- N'adhère pas aux sutures, aux agrafes ni aux dispositifs de fermeture adhésifs


Sous le microscope

Voici comment les perforations supérieures du pansement Telfa se comparent à celles des pansements de ses concurrents¹. Notez la taille optimale des perforations du pansement Telfa, qui permet à l'exsudat de s'écouler sans que les tissus adhèrent au pansement.

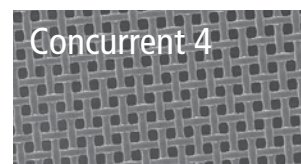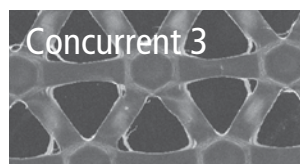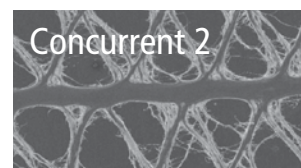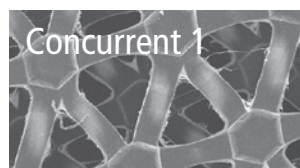

Comparaison de l'adhérence de pansements secs non adhérents

Dans ce test, l'adhérence est mesurée par la force requise pour retirer le pansement d'une bande de foie de bœuf de cinq centimètres¹.

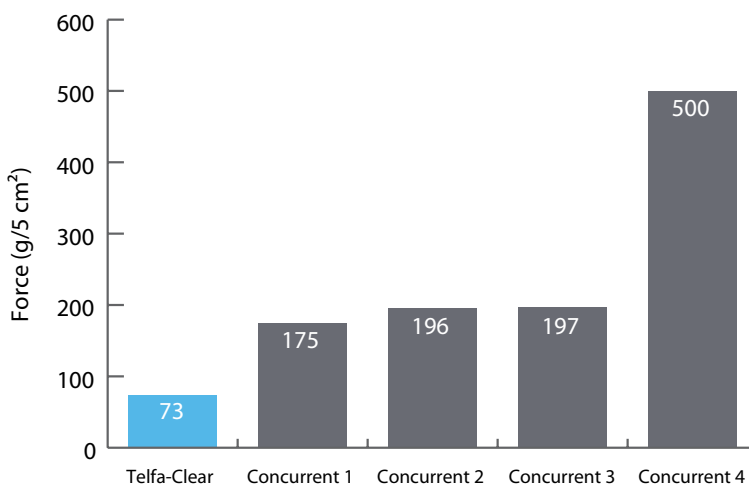


Source: Quigg, J. Gilbert, J & Reil, L 1994




Pansement Telfa Clear

Film de polyester perforé non adhérent

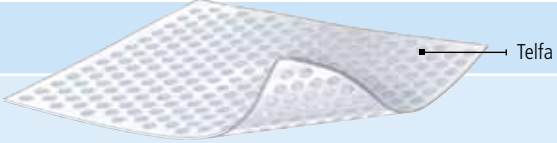Non adhérent	Permet la croissance de nouveaux tissus sans nuire au processus de cicatrisation. Retrait sans douleur. N'adhère pas aux sutures, aux agrafes ni aux dispositifs de fermeture de plaie adhésifs	
Non absorbant	Allié à un pansement secondaire approprié, peut être utilisé avec des plaies à exsudation légère, modérée ou abondante	
Film transparent	Permet l'évaluation du site de la plaie sans nuire au processus de cicatrisation. Peut être laissé en place pendant plusieurs jours	
Polyvalent	Offert en plusieurs tailles pratiques. Peut être utilisé avec différents types de plaies	
Découpable	Peut être adapté à différentes configurations de plaies	


Pansement Telfa non adhérent sans douleur

Film de polyester perforé non adhérent avec centre absorbant

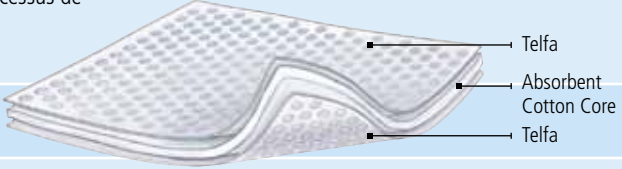Non adhérent	Permet la croissance de nouveaux tissus sans interrompre le processus de cicatrisation. Retrait sans douleur. N'adhère pas aux sutures, aux agrafes ni aux dispositifs de fermeture de plaie adhésifs	
Centre absorbant	Le centre en coton offre une absorption légère à modérée pour éliminer l'excès de liquide du site de la plaie	
Polyvalent	Offert en plusieurs tailles pratiques. Peut être utilisé avec différents types de plaies	

Pansements Telfa Island et Telfa Plus Island

Film de polyester perforé non adhérent avec centre absorbant et bordure adhésive

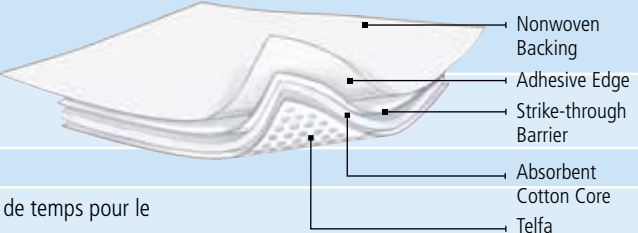Non adhérent	Permet la croissance de nouveaux tissus sans interrompre le processus de cicatrisation. Retrait sans douleur. N'adhère pas aux sutures, aux agrafes ni aux dispositifs de fermeture de plaie adhésifs	
Centre absorbant	Le centre en coton offre une absorption légère à modérée pour éliminer l'excès de liquide du site de la plaie (Telfa Plus offre un centre plus épais pour une absorption supérieure)	
Barrière au transpercement	Bordure adhésive unique qui prévient le transpercement du liquide et résiste à la pénétration par les bactéries extérieures	
Endos non tissé doux	Adaptable et confortable	
Bordure adhésive	Aucun pansement secondaire requis pour le fixer en place. Gain de temps pour le personnel infirmier. Idéal pour panser les plaies chirurgicales	
Polyvalent	Offert en plusieurs tailles pratiques. Peut être utilisé avec différents types de plaies	

Pansements Telfa Clear

Code	Description	Qté/bte	Qté/caisse
Emballage individuel stérile à endos détachable			
1109	7,6 x 7,6 cm (3 x 3 po)	25	50
1111	10,1 x 12,7 cm (4 x 5 po)	25	50
1113	30,5 x 30,5 cm (12 x 12 po)	25	50
1114	30,5 x 61 cm (12 x 24 po)	25	50

Pansements Telfa Clear (vrac)

Code	Description	Qté/caisse
En vrac, non stérile		
1115	99,1 cm x 22,9 m (39 po x 25 verges)	4 rouleaux

Pansements non adhérents Telfa sans douleur

Code	Description	Qté/bte	Qté/caisse
Emballage individuel stérile à endos détachable			
1050	7,6 x 10,1 cm (3 x 4 po)	50	900
1169	7,6 x 15,2 cm (3 x 6 po)	50	750
1238	7,6 x 20,3 cm (3 x 8 po)	50	600
28959	20,3 x 25,4 cm (8 x 10 po)	25	400

Emballage individuel stérile à endos détachable, boîte perforée

1961	5,1 x 7,6 cm (2 x 3 po)	100	2 400
2132	7,6 x 10,1 cm (3 x 4 po)	100	2 400

En vrac, non stérile, film non adhésif d'un côté

2891	7,6 x 20,3 cm (3 x 8 po)	200	1 000
3279	20,3 x 25,4 cm (8 x 10 po)	125	500

En vrac, non stérile, film non adhésif des deux côtés

12388	7,6 x 20,3 cm (3 x 8 po)		4 000
-------	--------------------------	--	-------

Pansements Telfa stériles

Code	Description	Qté/bte	Qté/caisse
Pansement Telfa stérile			
28959	20,3 x 25,4 (8 x 10 po)	25	400

Pansements Telfa Island

Code	Description	Qté/bte	Qté/caisse
Emballage individuel stérile à endos détachable			
7539LF	5,1 x 9,5 cm (2 x 3 ¾ po)	50	400
7540	10,1 x 12,7 cm (4 x 5 po)	25	200
7541	10,1 x 20,3 cm (4 x 8 po)	25	100
7542	10,1 x 25,4 cm (4 x 10 po)	25	100
7544	10,1 x 35,6 cm (4 x 14 po)	25	50
7550	10,1 x 10,1 cm (4 x 4 po)	25	200
7551	15,2 x 15,2 cm (6 x 6 po)	25	100

Pansements Telfa Plus Island

Code	Description	Qté/bte	Qté/caisse
Emballage individuel stérile à endos détachable			
2562	10,1 x 15,2 cm (4 x 6 po)	25	100
2563	15,2 x 17,8 cm (6 x 7 po)	25	100
2564	15,2 x 25,4 cm (6 x 10 po)	25	100
2565	20,3 x 20,3 cm (8 x 8 po)	15	60

Pansements Telfa adhésifs sans douleur

Code	Description	Qté/bte	Qté/caisse
Emballage individuel stérile à endos détachable			
6017	5,1 x 7,6 cm (2 x 3 po)	100	2 400
7643	7,6 x 10,1 cm (3 x 4 po)	100	1 200

¹ Quigg, J et al, Technical and Clinical Experience with Telfa Clear, 1994, Kendall Healthcare Products Co.

COVIDIEN, COVIDIEN et son logo et le logo de Covidien sont des marques déposées américaines et internationales de Covidien AG. Toutes les autres marques sont des marques de commerce d'une compagnie de Covidien. © 2012 Covidien.

Fabriqué par : Covidien Ilc, 15 Hampshire Street, Mansfield, MA, É.-U., 02048

CDN-P00175-F (H6313) Rev. 2012/01

