

[ Sûr. Solide. Pratique. ]

# Soins à apporter à l'adhésif cutané couvrant votre plaie

## Instructions au patient

- Ne pas tirer ni gratter le film polymérisé de l'adhésif cutané topique SwiftSet<sup>MC</sup>.
- Une douche ou un bain léger est permis, mais éviter de frotter, d'immerger ou d'exposer la plaie à l'eau de manière prolongée (y compris la baignade) avant que le film ne se détache naturellement de lui-même (habituellement en 5 à 10 jours).
- Ne pas appliquer de médicament liquide, en onguent ou en crème sur la plaie.
- Signaler tout inconfort ou toute autre préoccupation à votre médecin.



COVIDIEN, COVIDIEN et son logo et le logo de Covidien sont des marques déposées américaines et internationales de Covidien AG. Toutes les autres marques sont des marques de commerce d'une compagnie de Covidien. © 2014 Covidien. CDN-S00295-F Rev. 2014/05  
Licence de Santé Canada détenue par : Advanced Medical Solutions (Plymouth) LTD.



SwiftSet<sup>MC</sup> – Adhésif cutané topique de Covidien.