



Fauteuil électrique de podologie Barrier-Free®

647/646



MIDMARK®



Redécouvrez la partie la plus importante du fauteuil de podologie, le repose-pieds

La fauteuil électrique de podologie Midmark 647 Barrier-Free® permettra d'aborder les soins des pieds et des chevilles différemment. La conception ergonomique du repose-pieds apporte aux médecins tout ce dont ils ont besoin sur le lieu de soin, y compris pour réaliser les interventions les plus longues. Les poignées de relâchement faciles d'accès et les boutons de commande intelligemment placés s'ajoutent aux fonctionnalités qui rendent votre travail plus facile.

Des critères de conception simples offrent aux patients un confort optimal.

Des patients bien installés sont des patients détendus.

Que vous optiez pour la garniture brevetée Premium Comfort System® ou choisissiez le modèle moelleux Ultra-Premium (en option), le fauteuil Midmark 647 est conçu pour détendre les patients et donc réduire leurs mouvements au cours d'une intervention.



Bras de fauteuil

Les bras de fauteuil sont conçus pour servir d'appui aux patients lorsqu'ils s'installent sur le fauteuil. Les bras peuvent pivoter de façon à dégager complètement le passage, permettant aux personnes âgées, handicapées ou obèses de prendre place plus facilement sur le fauteuil. Les bras peuvent être installés ou retirés facilement pour plus de commodité, et ce, sans avoir besoin d'outils.



Premium Comfort System®

Un matériau élastomère de pointe recouvrant la découpe du siège assure le bien-être du patient en donnant à la table d'intervention tout le confort d'un fauteuil.

Brevet US n° 7 376 991 B2



Hauteur basse

Avec une hauteur basse de 48,3 cm (19") et l'absence d'obstacle, les patients handicapés, âgés ou obèses peuvent accéder en toute facilité au fauteuil tout en gardant leur dignité.



Commandes manuelles intégrées

Les boutons de commande, intelligemment placés de chaque côté du repose-pieds, offrent un contrôle à portée de main.

Brevet en instance



Repose-pieds ergonomique

Les poignées de relâchement idéalement situées peuvent être actionnées à une main et ne demandent aucun effort. Une cuvette à résidus en acier inoxydable est placée de façon à pouvoir récupérer les résidus sans entraver le passage.

Brevet en instance



Glissières protégées

Conception aseptique simplifiant le nettoyage et l'entretien en évitant l'accumulation de résidus et de saleté. Cela permet un bon fonctionnement, sans encombre.

Brevet en instance

Différentes options sont disponibles sur le fauteuil de podologie 647 pour procurer davantage d'efficacité

Les nombreuses options disponibles du fauteuil s'adaptant parfaitement à votre cabinet et à vos besoins et procurent une efficacité et des fonctionnalités inégalées qui feront de votre achat un investissement judicieux sur le long terme.



Positionnement facile du patient

Multi-positionnement motorisé

Nos moteurs conçus de manière personnalisée permettent de mettre rapidement vos patients dans la bonne position d'examen, vous permettant d'être plus productif. Les mouvements électriques du siège, du dossier et de l'inclinaison vous donnent la souplesse nécessaire pour positionner les patients de façon plus ergonomique.



Position d'accès



Position d'examen assise



Position d'examen debout



Position horizontale

Choisissez une fonction de programmation en option et un positionnement de patient à touche unique

Appuyez sur un bouton et toutes les sections de la table se déplacent simultanément. Enregistrez jusqu'à quatre de vos positions préférées.



Rotation

La rotation de fauteuil peut vous donner l'espace nécessaire pour travailler, y compris dans les salles les plus petites. Une simple pression sur la pédale, pouvant être placée sur le côté de votre choix, permet une rotation de 350°. Une deuxième pression sur la pédale bloquera la position de la chaise. Rien de plus simple.



Prises électriques

Les prises électriques de qualité médicale et commandes sans fil en option libèrent votre sol de tout cordon d'alimentation et donnent un aspect propre à votre salle d'intervention.



Quick Exam®

La pédale de commande non programmable dispose d'un bouton Quick Exam® qui fait bouger l'inclinaison et le siège simultanément, repositionnant ainsi le fauteuil en position d'examen par un seul déplacement fluide.



Pédale de commande étanche

La pédale de commande est étanche à la saleté et aux résidus, la rendant facile à nettoyer et lui garantissant une longue durée de vie. Le bouton Quick Chair™ remet le fauteuil dans sa position de départ, permettant au patient de quitter le fauteuil rapidement.

Accessoires procurant davantage d'efficacité et de fonctionnalité



Écran de blocage de la vue
L'écran de blocage de la vue est simple à installer, retirer ou faire pivoter, vous permettant de bloquer la vue du patient en toute facilité lorsque vous devez pratiquer une intervention délicate. Le couleur de l'écran est assortie à celle du fauteuil pour harmoniser l'ensemble.



Rails de base
Les rails de base sont conçus pour vous permettre de disposer d'un point de fixation pratique pour attacher d'autres accessoires. Logés sous le siège, ils ne gêneront pas les patient lors de leur installation.



Plateau d'instrument à bras pivotant
Conçu pour que vos instruments et fournitures puissent rester à portée de main, ce qui vous permet de gagner du temps et de dégager le sol. Disponible en deux versions : à plateau fixe ou à rallonge (version affichée).



Étagère pour PC à bras pivotant
Placez votre ordinateur portable ou tablette juste à côté de vous et gardez un contact visuel avec le patient tout en accédant à vos fichiers ou en saisissant des données. Vous pouvez aussi vous en servir pour poser divers documents ou bien pour écrire.



Pédale de commande sans fil
Elles permettent d'éliminer les cordons d'alimentation et les obstacles. Appréciez la liberté de placer votre pédale de commande n'importe où dans la pièce. Un avertisseur sonore de batterie faible permet de signaler l'imminence d'un changement de pile.
**Disponible uniquement sur le modèle 647*



Roulettes
Des roulettes de blocage assurent la mobilité de l'équipement sans sacrifier le précieux espace au sol. Les roulettes ajoutent 8,9 cm (3 ½") à la hauteur de siège minimale et maximale, créant un espace sous le fauteuil pour les pieds de la table de Mayo.



Porte-rouleau de papier
La possibilité de protéger le dossier et le siège avec du papier peut s'avérer essentielle si vous souhaitez partager le fauteuil avec des confrères ayant d'autres spécialités. Contient un rouleau de papier de 53,3 cm x 8,9 cm (21" x 3 ½").
**Disponible uniquement sur le modèle 647*



Lampe d'examen à DEL
Conçue avec une facilité d'accès aux commandes, une haute intensité lumineuse et un foyer thermique réglable, la Ritter 253 est le complément parfait de toute salle d'intervention. Disponible en version pour montage sur table et en version mobile.



Protection en plastique pour le repose-pieds
Chaque ensemble de garniture est livré en standard avec une protection en plastique pour le repose-pieds. Des protections de rechange sont disponibles pour que votre fauteuil puisse rester propre et en parfait état : elles le protégeront de l'usure causée par un nettoyage fréquent.



Fauteuil d'intervention podologique de base Midmark 646

Le fauteuil 646 est une solution économique pour les podologues ne travaillant qu'avec la position assise. Équipé du même repose-pieds ergonomique, le fauteuil vous évitera de sacrifier des fonctionnalités sur le lieu de soin.

Le fauteuil 646 dispose d'une hauteur de siège fixe de 53,3 cm (21") et est doté d'un dossier et d'une inclinaison électriques. Les boutons de commande et la pédale de commande étanche, ainsi que les glissières protégées du repose-pieds et le plateau à résidus présents sur ce modèle sont standard. Vous serez agréablement surpris par la facilité de nettoyage et d'utilisation du fauteuil.

Une inclinaison électrique permet de placer le repose-pieds en position d'examen tandis que ce dernier se déploie pour s'adapter aux patients de grande taille. Vous pouvez aussi personnaliser le fauteuil Midmark 646 en faisant votre choix parmi différents accessoires disponibles, à l'exception du porte-rouleau de papier et des commandes sans fil.

Spécifications du fauteuil 647

Capacité de poids du patient :
204 kg (450 lb)

Hauteur d'assise :
Minimum 48,3 cm (19")
Maximum 101,6 cm (40")

Hauteur du repose-pieds :
En position rétractée
de 39,4 cm à 137,2 cm
(de 15,5" à 54")

En position déployée
de 35,6 cm à 144,8 cm
(de 14" à 57")

Repose-pieds :
66 cm l x 15,2 cm H (26" x 6")

Rallonge de repose-pieds :
22,9 cm (9")

Plateau à résidus :
38,4 cm l x 26,9 cm H x 3,8 cm P
(15,1" x 10,6" x 1,5")

Amplitude d'angle d'inclinaison
du dossier :
de 0° à 80°

Amplitude d'angle d'inclinaison
du fauteuil : de 0° à 30°

Largeur du siège avec bras de
fauteuil installés : 95,3 cm (37,5")

Pédale de commande :
36,8 cm l x 15,2 cm H (14,5" x 6")

Caractéristiques de la prise
électrique¹ :
115 V CA, 3 A

Options

Dessus de garniture Premium :
sans coutures pour un nettoyage
facile (comprenant une protection
en plastique pour le repose-pieds)

**Dessus de garniture
Ultra-Premium :**
avec coutures, moelleuse pour une
apparence haut de gamme et un
confort sans pareil (comprenant
une protection en plastique pour le
repose-pieds)

Fonction de programmation :
Trois positions personnalisables
selon vos besoins

Prises électriques :
doubles, de qualité médicale
(de chaque côté)¹

Rotation :
Permet une rotation de la table
de 350° et ajoute 8,9 cm (3,5")
aux caractéristiques de hauteur
de siège minimale et maximale

Normes de sécurité

UL 60601-1 et CAN/CSA C22.2
N° 601.1-M90

Conforme à la norme CARB 93120.2 phase 2

Midmark est une société certifiée ISO 13485 et ISO 9001.

Pour de plus amples informations ou pour une démonstration, contactez votre revendeur Midmark ou composez le : 1-800-MIDMARK Fax : 1-800-365-8631
En dehors des États-Unis, composez le : 1-937-526-3662 Fax : 1-937-526-8392 ou rendez-vous sur notre site Web à l'adresse midmark.com

© 2012 Midmark Corporation
Fabriquée par Midmark Corporation
60 Vista Drive Versailles, Ohio 45380, USA.
Produits susceptibles de subir des modifications d'amélioration sans préavis
Litho aux États-Unis 007-0730-02 Rév. E1 (9/15)

Spécifications du fauteuil 646

Capacité de poids du patient :
204 kg (450 lb)

Hauteur d'assise :
Hauteur fixe de 53,3 cm (21")

Hauteur du repose-pieds :
En position rétractée de
45,7 cm à 88,9 cm
(de 18" à 35")

En position déployée
de 39,4 cm à 95,3 cm
(de 15,5" à 37,5")

Repose-pieds :
66 cm l x 15,2 cm H (26" x 6")

Rallonge de repose-pieds :
22,9 cm (9")

Plateau à résidus :
38,4 cm l x 26,9 cm H x 3,8 cm P
(15,1" x 10,6" x 1,5")

Amplitude d'angle d'inclinaison
du dossier :
de 0° à 80°

Amplitude d'angle d'inclinaison
du fauteuil : de 0° à 30°

Largeur du siège avec bras de
fauteuil installés :
95,3 cm (37,5")

Pédale de commande :
36,8 cm l x 15,2 cm H (14,5" x 6")

Caractéristiques de la prise
électrique :
115 V CA, 3 A

Accessoires

Rail de base

Support à roulettes¹

Roulettes¹

Cordon d'alimentation, 91,4 cm
de long (3')

Potence à perfusion³

Porte-rouleau de papier⁴

Écran de blocage de la vue

Commande sans fil, style
linéaire^{2, 4}

Protection en plastique de
rechange pour le repose-pieds

Plateau d'instrument à bras
pivotant, à plateau fixe

Plateau d'instrument à bras
pivotant, avec rallonge

Étagère pour PC à bras pivotant

Plateau d'instrument, bras pivotant
(plateau uniquement)



Premium Comfort System®

Un matériau élastomère de pointe recouvrant la découpe du siège assure le bien-être du patient en lui offrant tout le confort d'un fauteuil. La largeur du siège et du dossier apporte à vos patients le confort et le maintien nécessaires.

La longueur se situe entre 190,5 cm (75") et 213,4 cm (84") lorsque le repose-pieds est déployé.

Brevet US n° 7 376 991 B2

Illustration de la garniture
Ultra Premium.

¹ – Non disponibles sur les modèles rotatifs

² – Comprend une pédale de commande (avec piles)

³ – Requiert l'accessoire de rail de base

⁴ – Disponibles uniquement sur le modèle 647

Coloris de garniture Premium Solid

Myrtille-235

Bleu cachemire-239

Armoise argentée-236

Terra Cotta-240

Gris fossile-238

Thé vert-237

Noir-312

Coloris de garniture Premium Pattern

Belagio-247

Capri-251

Sienna-248

Trévise-252

Florence-250

Toscane-249

Coloris de garniture Ultra-Premium Solid

Bleu Pacifique ultra-241

Ciel ultra-245

ÉpINETTE ultra-242

Canyon ultra-246

Arctique ultra-244

Olivine ultra-243

Ailes de corbeau ultra-228



Because we care.