

REF COV-19C25

Étape 2 - Option A: Écouvillon Nasal (Narines)



Étape 2a.1

Inclinez la tête du patient de 70°. Insérez l'écouvillon à au moins **0,5 pouce** à l'intérieur de la narine jusqu'à ce qu'une légère résistance soit rencontrée au niveau du cornet moyen.




Étape 2a.2

L'orifice nasal doit être tamponné pendant au moins cinq secondes en effectuant des mouvements circulaires.



Étape 2a.3

Compresssez la narine avec les doigts pour piéger la pointe de l'écouvillon et faites-la tourner pendant au moins cinq secondes.

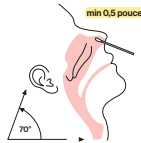


Étape 2a.4

Retirez et répétez cette procédure dans l'autre narine avec le même tampon.

Étape 1

Mélangez délicatement le tampon d'extraction.

Ajoutez 10 gouttes dans le tube d'extraction.

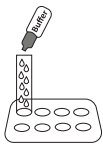


Étape 2 - Option B: Écouvillon Nasopharyngé

Étape 2b


Insérez doucement l'écouvillon dans la narine parallèlement au palais, pas vers le haut. La distance doit être équivalente à celle de l'oreille à la narine du patient, indiquant le contact avec le nasopharynx, ou jusqu'à ce qu'une résistance soit rencontrée.

Frottez et roulez doucement l'écouvillon, laissez en place quelques secondes pour saturer la pointe avec de la sécrétion. Retirez lentement l'écouvillon tout en le faisant tourner.

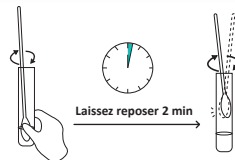

Étape 3

Insérez l'écouvillon dans le tube d'extraction. Bien mélangez et pressez l'écouvillon 10 à 15 fois. Après 2 minutes, retirez l'échantillon en le pressant contre la paroi interne, en essayant de libérer le maximum de liquide possible lors du retrait.

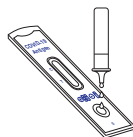

Étape 4

Insérez la buse dans le tube d'extraction.

Étape 5


Ajoutez 3 gouttes de la solution dans le puits d'échantillon en pressant doucement le tube.



Étape 6

Lecture des résultats après 15 minutes.

Interprétations des Résultats

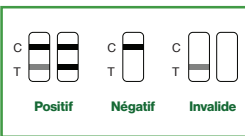

AVERTISSEMENT: Cette fiche de référence ne remplace pas les instructions d'utilisation. Lisez la notice du produit avant utilisation.