



Protecteur cutané non irritant Cavilon^{MC} 3M^{MC}



Indications :

- Peaux endommagées : excoriées, rouges ou dénudées
- Barrière protégeant le pourtour de la plaie
- Lésions cutanées
- Petites coupures et égratignures
- Protecteur cutané pour les peaux sensibles et délicates
- Protecteur cutané pour les changements fréquents de pansements

Mode d'emploi :

1. La peau doit être propre et sèche avant l'application du protecteur cutané non irritant Cavilon^{MC}.
- 2 a) Tampon ou tube-applicateur : Appliquer une couche uniforme de produit sur toute la surface à protéger.
b) Flacon pulvérisateur : Tenir l'embout à 10 à 15 cm (4 à 6 po) de la peau et appliquer uniformément le protecteur sur la surface à protéger en effectuant des mouvements de balayage.
3. Si on oublie une zone, appliquer du protecteur sur cette surface seulement après que la première couche de protecteur cutané non irritant Cavilon^{MC} soit sèche (environ 30 secondes).
4. Si le protecteur cutané non irritant Cavilon^{MC} est appliqué sur les plis cutanés ou sur deux surfaces cutanées entrant en contact l'une avec l'autre, séparer ces surfaces pour laisser sécher entièrement la pellicule avant de les laisser reprendre leur position normale.

Suite au verso...



La prévention avant tout



3M

Protecteur cutané non irritant Cavilon^{MC} 3M^{MC}

Mode d'emploi (suite) :

5. On recommande d'appliquer de nouveau du protecteur cutané non irritant Cavilon^{MC} toutes les 24 à 72 heures, selon la fréquence des nettoyages.
6. Appliquer de nouveau du protecteur cutané non irritant Cavilon^{MC} au moment de chaque changement de pansement.
7. Au besoin, on peut enlever la pellicule avec la plupart des solvants pour adhésifs médicaux en respectant les directives d'utilisation. Nettoyer et sécher la surface à traiter avant d'appliquer de nouveau du protecteur cutané non irritant Cavilon^{MC} conformément au mode d'emploi.
8. Remettre le capuchon sur l'embout du flacon pulvérisateur entre chaque application.

On peut appliquer ce produit sur des adultes, des enfants et des nourrissons de plus d'un mois.



Renseignements pour commander :

N° de référence	Format	Articles/boîte	Boîtes/caisse
3343E	Tube-applicateur de 1,0 ml	25	4
3344E	Tampon-applicateur de 1,0 ml	30	6
3345E	Tube-applicateur de 3,0 ml	25	4
3346E	Flacon pulvérisateur de 28,0 ml	12	1

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le représentant de la Division des produits de soins cutanés ou de traitement des plaies de 3M ou avec le Centre de renseignements de la Division des produits de soins de santé de 3M au 1 800 364-3577.

Offert au Canada par :

**Division des produits de soins cutanés
et de traitement des plaies
Compagnie 3M Canada**

C.P. 5757, London, Ontario N6A 4T1
Canada

1 800 364-3577

www.3M.ca/healthcare

3M Health Care

3M Center, Building 275-4W-02
St. Paul, MN 55144-1000, É.-U.

3M et Cavilon sont des marques de commerce de 3M, utilisées sous licence au Canada.
Veuillez recycler. Imprimé au Canada.

© 3M, 2011. Tous droits réservés. 1103-00930 F