

3M Soins de santé

Pansement absorbant en acrylique transparent Tegaderm^{MC} 3M^{MC}

Pansement absorbant en acrylique transparent Tegaderm^{MC}

Une nette amélioration
en matière de gestion des plaies

Possibilité d'observer la plaie sans enlever le pansement

- Polyvalent – idéal pour les déchirures cutanées, les ulcères de pression, les abrasions, les plaies chirurgicales post-opératoires et les zones donneuses
- Fournit un milieu de cicatrisation humide qui favorise le débridement autolytique de la plaie
- Très moulant et très confortable pour les patients
- Facile à appliquer et à retirer

Se classe beaucoup mieux* que le principal pansement hydrocolloïde en matière de :


- Possibilité d'évaluer la plaie avant et après l'absorption de l'exsudat
- Agit comme une barrière
- Confort pour le patient
- Souplesse avant et après l'absorption de l'exsudat
- Facilité de retrait
- Non adhérence au lit de la plaie
- Résidus dans le lit de la plaie et sur la peau
- Odeur
- Durée d'utilisation

* Données d'une étude contrôlée de sites multiples sur échantillon aléatoire conservées sur fichier chez 3M.

3M

Les avantages des pansements absorbants en acrylique transparent Tegaderm^{MC} 3M^{MC} dotés d'une plus grande absorption

Pansement absorbant en acrylique transparent Tegaderm^{MC} – Technologie évoluée de 3M

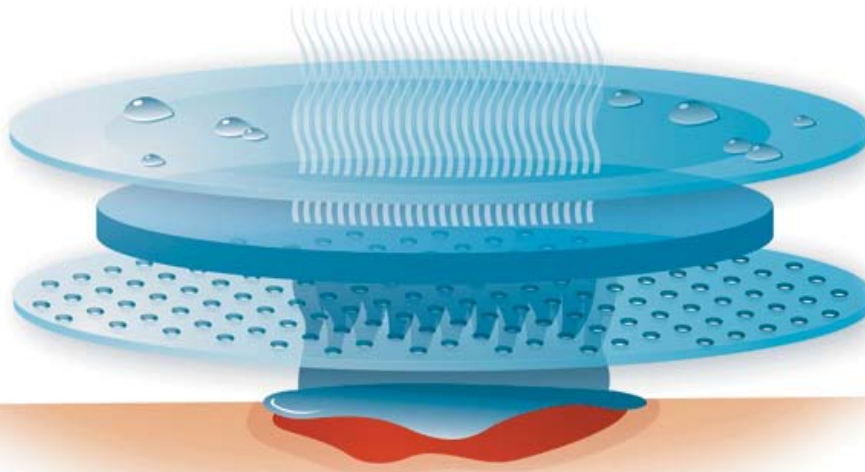

La couche extérieure imperméable mais perméable à l'air de la pellicule transparente Tegaderm^{MC} permet la diffusion de la vapeur d'eau et fournit également une barrière protectrice contre les contaminants extérieurs.

Grâce à ce processus de diffusion, l'exsudat de la plaie est absorbé dans la compresse en acrylique transparent breveté.

L'exsudat de la plaie passe à travers les perforations de la couche intérieure de la pellicule transparente Tegaderm^{MC}, qui est recouverte d'un adhésif adhérent aux peaux humides.

Observation facile des plaies

- Possibilité d'observer la plaie sans changer le pansement
- Permet d'éliminer les changements superflus de pansements
- Permet de réduire les coûts de fourniture et de personnel

Port confortable

- Retrait en douceur
- Très moulant
- Longue durée d'utilisation

Meilleures pratiques recommandées par l'industrie

- Meilleures pratiques recommandées par l'industrie en matière de traitement des déchirures cutanées*

Utilisation pratique

- Grandes languettes non adhésives qui facilitent la manipulation du pansement avec des gants
- Facile à centrer et à appliquer sur la plaie
- Emballage convivial

Innocuité et efficacité

- Test d'innocuité conforme à la norme ISO 10993, partie 1
- Surface à faible friction pour minimiser la friction et le cisaillement
- Faible risque de macération du pourtour de la plaie
- Bord adhésif de la pellicule qui minimise les risques de défaillance du pansement
- Hypoallergène et exempt de latex

Utilisations recommandées

Le pansement absorbant en acrylique transparent Tegaderm^{MC} est idéal pour les :

- Ulcères de pression
- Déchirures cutanées
- Abrasions
- Zones donneuses
- Brûlures superficielles
- Plaies chirurgicales post-opératoires

Ce pansement peut également être utilisé comme pansement secondaire absorbant par-dessus des pansements pour cavités de plaies, comme des alginates.

* Leblanc Kimberly et coll., Best Practice Recommendations for the Prevention and Treatment of Skin Tears, Wound Care Canada, volume 6, numéro 1 (mai 2008) pages 14 à 30.


Utilisations du pansement absorbant en acrylique transparent Tegaderm^{MC} 3M^{MC}



Comme pansement principal sur les ulcères de pression de stades II et III avec exsudat faible à moyen



Sur les déchirures cutanées et les plaies traumatiques superficielles

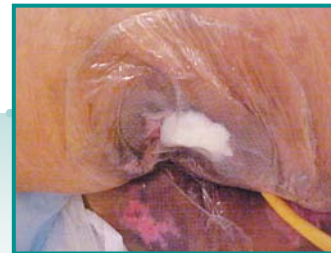

Comme pansement secondaire sur les plaies nécessitant un pansement absorbant pour cavités de plaies









Comme pansement principal sur les zones donneuses



Sur des blessures liées à la pression

Pansement absorbant en acrylique transparent Tegaderm^{MC} 3M^{MC}

Renseignements pour commander

Numéro de référence	Dimensions de la compresse (l x L)	Dimensions du pansement complet (l x L)	Pansements/boîte	Boîtes/caisse
 90800 ovale	3,8 x 5,7 cm 1,5 x 2,25 po	7,6 x 9,5 cm 3,0 x 3,75 po	5	6
 90801 ovale	6,0 x 7,6 cm 2,4 x 3,0 po	11,1 x 12,7 cm 4,4 x 5,0 po	5	6
 90802 carré	9,8 x 10,1 cm 3,9 x 4,0 po	14,9 x 15,2 cm 5,9 x 6,0 po	5	6
 90803 ovale	8,5 x 10,7 cm 3,4 x 4,25 po	14,2 x 15,8 cm 5,6 x 6,25 po	5	6
 90805 carré	14,9 x 15,2 cm 5,9 x 6,0 po	20,0 x 20,3 cm 7,9 x 8,0 po	5	4
 90807 région sacrée	11,75 x 14,3 cm 4,5 x 5,0 po	16,8 x 19,0 cm 6,6 x 7,5 po	5	4



Une solution claire du fabricant des pansements transparents Tegaderm^{MC} 3M^{MC}

Le pansement absorbant en acrylique transparent Tegaderm^{MC} 3M^{MC}, transparent et absorbant, pour une efficacité clinique et une durée d'utilisation optimales.

Compatible avec les produits de soins cutanés 3M :

- Protecteur cutané non irritant Cavilon^{MC} 3M^{MC}
- Pansements d'alginate hautement gélifiant HG Tegaderm^{MC} 3M^{MC}
- Pansements d'alginate à haute intégrité HI Tegaderm^{MC} 3M^{MC}
- Prévêtement non adhérent Tegaderm^{MC} 3M^{MC}

Pansements Tegaderm^{MC} 3M^{MC} SIMPLES. FIABLES. ÉPROUVÉS.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le représentant des Soins cutanés 3M de votre région ou le Centre de renseignements de la Division des produits de soins de santé de 3M au 1 800 364-3577.



3M Soins de santé
Compagnie 3M Canada
C.P. 5757
London (Ontario) N6A 4T1
Canada

1 800 364-3577

www.3M.com/ca/healthcare

3M Health Care/3M Soins de santé
3M Centre, Building 275-4W-02
St. Paul, MN 55144-1000
É.-U.

3M, Cavilon et Tegaderm sont des marques de commerce de 3M, utilisées sous licence au Canada. Veuillez recycler. Imprimé au Canada. © 2008, 3M. Tous droits réservés 0806-2465